

# INSTRUCTIVO SUMINISTRO DE OXIGENO POR CILINDROS DE ALTA PRESIÓN

IT015

## 1. NORMAS DE SEGURIDAD

<p>No fumar cerca de los cilindros.</p> 	<p>Utilizar las herramientas adecuadas en el momento de la instalación del regulador.</p> 	<p>No permitir que los niños jueguen cerca de los cilindros.</p> 
<p>No colocar el cilindro cerca al fuego.</p> 	<p>No colocar el cilindro en superficies irregulares. fíjelo a la pared para evitar una posible caída.</p>  	<p>No golpear el cilindro con ningún tipo de herramienta. No utilizar martillos, ni pinzas para abrir el cilindro.</p> 
<p>No colocar el cilindro a la exposición directa del sol.</p> 	<p>No mezclar grasas con el oxígeno, provoca fuego.</p> 	<p>No tener cilindros en lugares peligrosos.</p> 
<p>Cerrar la válvula después de terminar el servicio. <i>La válvula se cierra en sentido de las manecillas del reloj.</i></p> 	<p>No mover el humidificador de agua de manera brusca porque puede romperse.</p> 	<p>Mantener el humidificador con agua y limpia, realizar el cambio de agua mínimo dos veces a la semana.</p> 

## 2. MANIPULACIÓN

### 2.1. PREPARACIÓN

- El técnico que le entrega el cilindro, realiza toda la instalación, entrega listo el equipo para su dosificación.
- Desenrosque la tapa del humidificador e introduzca agua hasta la mitad del recipiente.
- Conecte la cánula del paciente en la boquilla lateral del humidificador.

### 2.2. DOSIFICACIÓN

- Revise la dosificación prescrita por el médico.
- Verifique que la válvula del cilindro se encuentre abierta.
- Gire la perilla del regulador hasta la cantidad requerida.
- Absténgase de aumentar o disminuir dicha dosificación sin previa prescripción médica.

### 3. FARMACOVIGILANCIA-TECNOVIGILANCIA

- Informar a las líneas telefónicas 7427846 opción2 línea de WhatsApp 3208589003-3219169429 o al correo electrónico [farmacovigilancia.macromed@gmail.com](mailto:farmacovigilancia.macromed@gmail.com) las situaciones en las que perciba que el oxígeno generado está afectando la salud del paciente.
- Informar a las líneas telefónicas 7427846 opción2 línea de WhatsApp 3208589003-3219169429 o al correo electrónico [tecnovigilancia.macromed@gmail.com](mailto:tecnovigilancia.macromed@gmail.com) las situaciones en las que perciba que el regulador está afectando la salud del paciente.

## 4. SERVICIO

### 4.1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- Para cualquier servicio a solicitar cerciórese y confirme con su prestador de salud (EPS/IPS) el cumplimiento de los requisitos mínimos para acceder al préstamo de los equipos, con el fin de contar con la documentación requerida y así evitar demoras en la entrega y prestación del servicio.

### 4.2. CAMBIO DE DOMICILIO

- Si el paciente se va a cambiar a otro domicilio, solicite el transporte de los equipos a esa nueva dirección en las líneas telefónicas 7427846 opción2 3208589003. Absténgase de transportar el equipo por cuenta propia.

### 4.3. CAMBIO DESCARTABLES

- Solicite cada tres meses el cambio de la cánula y humidificador en MACROMED en la dirección KR 56 5C 38 con la remisión de la última entrega.

### 4.4. SOLICITUD DE RECARGA

- Cuando el "reloj" del regulador (manómetro) se encuentre en la franja roja solicite en las líneas telefónicas 7427846 opción2 3208589003 la recarga, en el transcurso del día siguiente a su solicitud se realizará el servicio.
- Los cilindros portátiles deben recargarse en las instalaciones de MACROMED en la dirección KR 56 5C 38 (Lunes a Viernes 7AM a 5PM- Sábados 7AM a 1PM), presentando el soporte del servicio médico que requiere el usuario fuera de su domicilio.

### 4.5. CAPACITACIÓN

- En caso de requerir asesoría en la manipulación o servicio, comuníquese en las líneas telefónicas confirme su asistencia en las líneas telefónicas 7427846 opción2 línea de WhatsApp 3208589003-3219169429 o ingrese a la página web. <https://macromedsas.com.co>
- Si desea asistir a las charlas informativas que se realizan periódicamente en nuestras instalaciones, confirme su asistencia en las líneas telefónicas 7427846 opción2 línea de WhatsApp 3208589003-3219169429 donde se le indicará fecha, hora y lugar de realización, o ingrese a la página web. <https://macromedsas.com.co>

**NOTA:** Este es un instructivo general del manejo de cilindros de oxígeno medicinal, por lo que la manipulación puede variar según el modelo del cilindro y regulador que le sea entregado al usuario. Las condiciones del servicio pueden variar según el contrato establecido con su EPS/IPS.